

NX Veterinary

Workflow



Computer



Libraries



Network



Recycle Bin



Control Panel



Start NX Configurator



Start NX Viewer



Symantec pcAnywhere

The splash screen is divided into two main sections. The left section features a white frog skeleton on a black background. The letters 'NX' are written in purple in the top left corner. A horizontal bar with a rainbow gradient is positioned across the frog's mouth. At the bottom center, the 'AGFA HealthCare' logo is visible. The right section has a dark teal background. The letters 'NX' are written in white in the top right corner. In the bottom left of this section, the CE mark is shown above the number '041.3'. In the bottom right, the company name and address are listed: 'Agfa HealthCare N.V.', 'Septestraat 27', and '2640 Mortsel - Belgium'.



- Szukaj

- Lista robocza (0)

Badania zamknięte (603)

Przeгляд obrazu (2/2)



		Owner/Animal Name	Exam	Images	Referring Vet	
		0 lata	Małe - Szkielet < 10 kg 2011-08-18 16:48:14	2		
		0 lata	Małe - Szkielet < 10 kg 2011-09-10 21:53:48	1		
		0 lata	Klatka - Brzuch - Miednica 2011-09-05 11:04:58	2	dr Grobelak	
		0 lata	Klatka - Brzuch - Miednica 2011-09-02 13:59:36	1	dr Grobelak	
		0 lata	Klatka - Brzuch - Miednica, ... 2011-09-14 18:19:37	2		
		0 lata	Klatka - Brzuch - Miednica 2011-10-31 16:01:16	2		
		0 lata	Małe - Tkanka Miękka < 10 kg, ... 2011-09-26 18:10:36	3		
		0 lata	Średnie - szkielet 10-25 kg, ... 2011-11-02 14:00:47	5		
			Głowa 2011-09-19 17:39:55	1		
		0 lata	Klatka - Brzuch - Miednica 2011-08-29 13:13:02	1		
		12 lata	Małe - Tkanka Miękka < 10 kg 2011-08-29 11:40:28	2		
		12 lata Samica	Klatka - Brzuch - Miednica			



Nowe badanie

Użyj znowu danych pac.

Przenieś obrazy

Rozpocznij badanie

Lista robocza

Badanie

Edycja

Menu główne

Edytuj pacjenta

Nazwisko/Imie vlas... **TESTOWY JAN**

Imie zwierzecia : **PANKRACY**

Wiek (lata): **4**

Plec: **Samiec**

Plec pacjenta nijaka : **Niezmienione**

Organizacja : **World Wide Kennel Club**

Gatunek & Rasa : **Canine**
Japense Retriever dog I

Wet. Kierujacy : **KOWALSKI TESTOWY**

OK

Anuluj

Przegląd obrazu

Rozmiar kasety:

Identyfikator detekt...:

LGM:

Numer akcesji:

L

R



Sup

Prone

Ekspozycja (mAs): kVp (kV):

Odrzuć obraz

ID

Dodaj obraz

Zamknij i wyślij
wszystkie

Lista robocza

Badanie

Edycja

Menu główne

Pacjent

Nazwisko/Imie włas... **TESTOWY JAN PANKRACY** Organizacja : **World Wide Kennel Club**

Wiek: **4 lata** Gatunek: **Canine** [Edytuj](#)


Płeć: **Samiec** Rasa: **Japanese Retriever dog b...**

Plec pacjenta nijaka : **Nieznane** Wet. Kierujący : **KOWALSKI TESTOWY**

Dodaj obraz

Małe - Szkielet < 10 kg	Srednie - szkielet 10-25 kg	Duże - Szkielet 25-45 kg	Małe zwierzęta / Gad						
Małe - Tkanka Miękka < 10 kg	Srednie Tkanka mięk. 10-25 kg	Duże - Tkanka miękka 25-45 kg				Przedni goleń	Tylny goleń		
Głowa	Kregosłup szyjny	Radius - Ramię	Klatka - Brzuch - Miednica	Piszczel - Staw kolanowy	Kolano				
	Kregosłup lędźwiowo-krzyż. LAT	Staw skokowy LAT	Lokieć AP	Łapa DP	Staw kolanowy AP	Czaszka DV/VD	Miednica LAT	Kregosłup lędźwiowo-krzyż. VD	Kregosłup szyjny VD
Kregosłup szyjny LAT	Ramię (bark) LAT	Ramię (bark) AP	Czaszka LAT	Nadgarstek AP	Nadgarstek LAT	Szyja LAT	Czaszka komory nosowe	Czaszka Ukośnie	Kregosłup-Thoraco-lędźw. VD
Łapa LAT	Staw skokowy AP	Miednica VD	Kregosłup-Thoraco-lędźw. LAT	Czaszka Obwarte Usta	Szyja VD	Lokieć LAT	Staw kolanowy LAT		
							OK		

Przeгляд obrazu

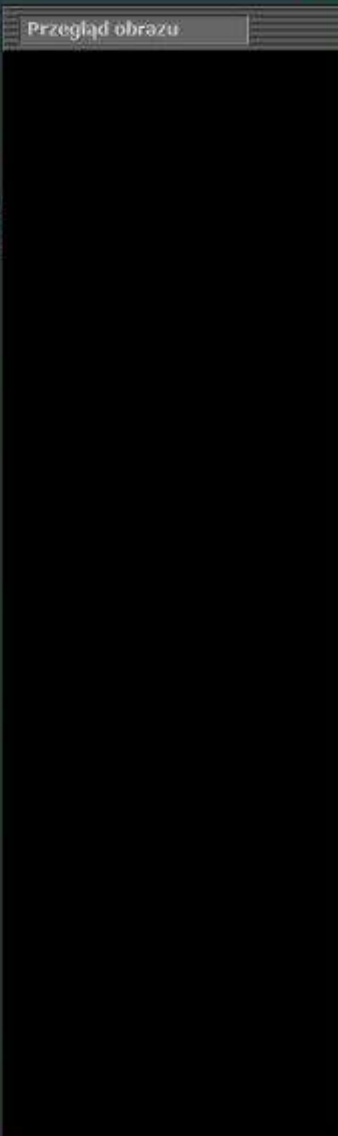

[Odrzuć obraz](#) [ID](#) [Usuń obraz](#) [Zamknij i wyslij wszystkie](#)

Pacjent

Nazwisko/Imię włas... TESTOWY JAN PANKRACY

Organizacja : World Wide Kennel Club

Wiek: 4 lata

Gatunek: Canine

Płeć: Samiec

Rasa: Japanese Retriever dog b...

Plec pacjenta nijaka : Niezmienione

Wet. Kierujący : KOWALSKI TESTOWY

Edytuj

Przeгляд obrazu

Dodaj obraz

Małe -
Szkielet < 10
kgŚrednie -
szkielet 10-25
kgDuże -
Szkielet 25-45
kgMałe
zwierzęta /
GadMałe - Tkanka
Mięka < 10
kgŚrednie
Tkanka mięk.
10-25 kgDuże - Tkanka
Mięka 25-45
kg

Przedni goleń

Tylny goleń

Głowa

Kręgosłup
szyjnyRadius -
RamięKlatka -
Brzuch -
MiednicaPiszczał -
Staw
kolanowy

Kolano

Kręgi 4 -6

Kręgi 7

Kręgi 1-3

Łędźwia

Piersiowy

Piersiowo-
łędźwiowy

Poll

Kręgi 6-7

OK

Odrzuć obraz

ID

Usuń obraz

Zamknij i wyślij
wszystkie

Lista robocza

Badanie

Edycja

Menu główne

Pacjent

Nazwisko/Imię włas... TESTOWY JAN PANKRACY

Organizacja : World Wide Kennel Club

Wiek: 4 lata

Gatunek: Canine

Płeć: Samiec

Rasa: Japanese Retriever dog b...

Plec pacjenta nijaka : Niezmienione

Wet. Kierujący : KOWALSKI TESTOWY

Edytuj

Przeгляд obrazu

Dodaj obraz

Małe -
Szkielet < 10
kgŚrednie -
szkielet 10-25
kgDuże -
Szkielet 25-45
kgMałe
zwierzęta /
GadMałe - Tkanka
Miękką < 10
kgŚrednie
Tkanka mięk.
10-25 kgDuże - Tkanka
miękką 25-45
kg

Przedni goleń

Tylny goleń

Głowa

Kręgosłup
szyjnyRadius -
RamięKlatka -
Brzuch -
MiednicaPiszczał -
Staw
kolanowy

Kolano

Kręgi 4 -6

Kręgi 7

Kręgi 1-3

Łędźwia

Piersiowy

Piersiowo-
łędźwiowy

Poll

Kręgi 6-7

OK 

Odrzuć obraz

ID

Usuń obraz

Zamknij i wyślij
wszystkie

Lista robocza

Badanie

Edycja

Menu główne

TESTOWY JAN PANKRACY



Pacjent

Nazwisko/Irmie włas... **TESTOWY JAN PANKRACY**

Wiek: **4 lata**

Płeć: **Samiec**

Plec pacjenta nijaka : **Niezmienione**

Organizacja : **World Wide Kennel Club**

Gatunek: **Canine**

Rasa: **Japenese Retriever dog b...**

Wet. Kierujacy : **KOWALSKI TESTOWY**

Edytuj

Szczegół obrazu



Grupa badań: **Piszczel - Staw kolanowy**

Typ ekspozycji: **DP Lewa**

Widok: **PA**

Orientacja kasety: **Pionowo**

Data i godzina akwi... **2011-09-12 11:39:31**

Komentarze do obr...

Rozmiar kasety: **24CMx30CM**

Identyfikator detekt... **B1RAMT0415**

LGM: **1,97**

Numer akcesji:

Edytuj

Przeгляд obrazu (2/2)



L

R



Ekspozycja (mAs...

KVP(kV):

Sup

Prone

Odrzuć obraz

ID

Dodaj obraz

Zamknij i wyślij
wszystkie

Lista robocza

Badanie

Edycja

Menu główne

TESTOWY JAN PANKRACY



Pacjent

Nazwisko/Imię włas... TESTOWY JAN PANKRACY

Wiek: 4 lata

Płeć: Samiec

Plec pacjenta nijaka : Niezmienione

Organizacja : World Wide Kennel Club

Gatunek: Canine

Rasa: Japenese Retriever dog b...

Wet. Kierujacy : KOWALSKI TESTOWY

Edytuj

Szczegół obrazu



Grupa badań: Piszczel - Staw kolanowy

Typ ekspozycji: DP Lewa

Widok: PA

Orientacja kasety: Pionowo

Data i godzina akwi... 2011-09-12 11:39:31

Komentarze do obr...

Rozmiar kasety: 24CMx30CM

Identyfikator detekt... B1RAMT0415

LGM: 1,97

Numer akcesji:

Edytuj

Przeгляд obrazu (2/2)



L

R



Sup

Prone

Ekspozycja (mAs...

KVP(kV):

Odrzuć obraz

ID

Dodaj obraz

Zamknij i wyślij wszystkie

Lista robocza

Badanie

Edycja

Menu główne

Wybierz

Adnotacje

Przebieg

Przebieg obr.

Powiększenie

Przebieg obrzeżów

Tryb



Przegląd obrazu (2/2)



LGM: 1,97

Odrzuć obraz

Zapisz jako nowy

Zamknij i wyślij wszystkie

Lista robocza

Badanie

Edycja

Menu główne

Wybierz


Adnotacje

Przeźr.-obr.

Powiększenie

Przetw. obrazów

Tryb

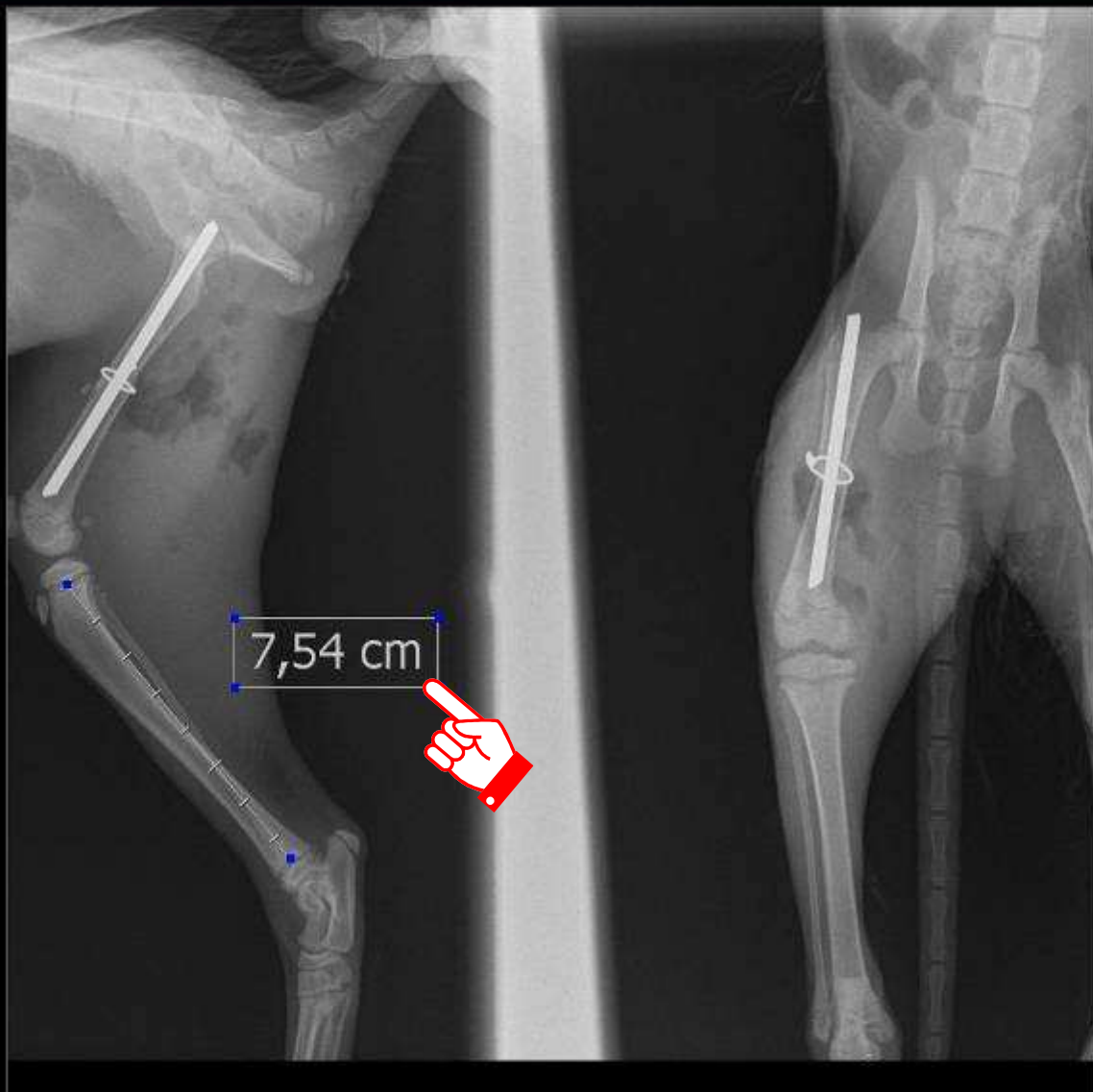

Przegląd obrazu (2/2)

VO

DP Lev

LGM: 1,97

Odrzuć obraz

Zapisz jako nowy

Zamknij i wyślij wszystkie

Lista robocza

Badanie

Edycja

Menu główne

Wybierz

Adnotacje

Przeźw. obr.

Powiększenie

Przezw. obrazów

Tryb



Przeгляд obrazu (2/2)



LGM: 1,97

Odrzuć obraz

Zapisz jako nowy

Zamknij i wyślij wszystkie

Lista robocza

Badanie

Edycja

Menu główne

Wybierz



Adnotacje



Prone



Przerz-obr.




Powiększenie



Przetw. obrazów



Tryb

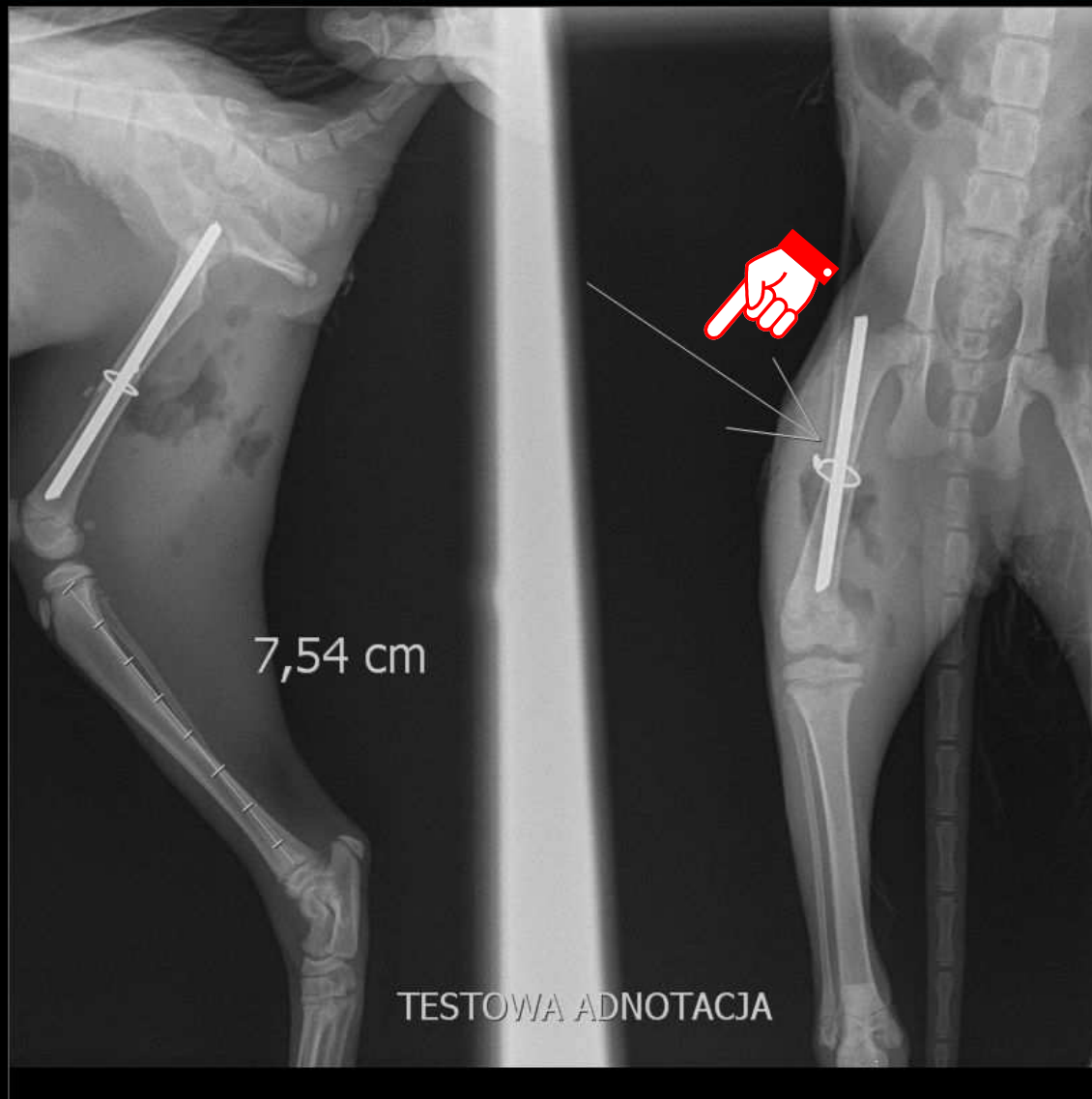

Przeгляд obrazu (2/2)



LGM: 1,97

Odrzuć obraz

Zapisz jako nowy

Zamknij i wyślij wszystkie

Lista robocza

Badanie

Edycja

Menu główne

Wybierz



Adnotacje



Prone



Przerz-obr.



Powiększenie



Przetw. obrazów



Tryb



Przeгляд obrazu (2/2)



LGM: 1,97



Odrzuć obraz

Zapisz jako nowy

Zamknij i wyślij wszystkie

Lista robocza

Badanie

Edycja

Menu główne